

beurer[®]
SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC **FM60**



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Beurer FM60 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HSDS trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- + Máy massage chân
- +HSDS tiếng Việt, Anh, Phiếu bảo hành

1. Giới thiệu về thiết bị

+ Máy massage chân khô **Beurer FM60** với 9 đầu quay giúp thư giãn cơ thể và bàn chân của bạn. Nó có tác dụng kích thích sự lưu thông máu, thúc đẩy tái tạo tế bào, tăng thêm sinh lực cho đôi bàn chân và làm giãn sự căng cơ.

Thiết bị này là dành cho chỉ sử dụng cá nhân và không được dùng cho mục đích y tế hoặc thương mại.

Thiết bị có thể được sử dụng cho trẻ trên 8 tuổi với sự giám sát của người lớn

Cáp kết nối nguồn điện của thiết bị này không thể thay thế, các thiết bị phải được loại bỏ trong trường hợp dây cáp bị hỏng.

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm


Thiết bị này chỉ để massage chân, không sử dụng khi bạn gặp những trường hợp sau:

Nếu bạn có một sự thay đổi gây ra bởi bệnh tật hoặc chấn thương trong khu vực của bàn chân của bạn (ví dụ như vết thương hở, mụn cóc, nhiễm nấm).

- Không sử dụng thiết bị quá 15 phút
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần bị hạn chế.
- Nên tham khảo ý kiến bác sỹ nếu bạn mắc phải bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục sau một chấn thương bàn chân của bạn, nếu bạn có bệnh tiểu đường.
- Không nên sử dụng với những người bị các bệnh về giãn tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch

3. Hướng dẫn sử dụng an toàn

- Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện khác, Máy massage chân FM60 này phải được xử lý chăm sóc và quan tâm đúng mức để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.
- Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau: Với điện áp quy định trên chỉ thiết bị. Không bao giờ sử dụng thiết bị khi có giông bão.
- Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện. Không bao giờ kéo dây dẫn điện hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Giữ các dây dẫn điện tránh xa bề mặt nóng.
- Thiết bị không được tiếp xúc với nước, hơi nước hoặc các chất lỏng khác.
- Chỉ sử dụng trong phòng khô, không sử dụng trong phòng tắm hay phòng xông hơi.
- Chỉ sử dụng với hai bàn tay khô.
- Không bao giờ sử dụng các thiết bị kèm theo chẳng hạn như chân hay gối.
- Thiết bị phải được tắt tại công tắc chính và bị ngắt kết nối từ nguồn điện mỗi lần sau khi sử dụng và trước khi làm sạch.
- Thiết bị có bề mặt nóng. Người nhạy cảm với sức nóng phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
- Không bao giờ chèn thêm bất kỳ đối tượng vào các lỗ hở trên thiết bị, và không bao giờ chèn bất cứ vật gì vào các bộ phận quay. Hãy chắc chắn rằng tất cả các bộ phận chuyển động có thể di chuyển tự do mọi lúc.
- Không bao giờ ngồi hoặc đứng trên bộ phận chuyển động của thiết bị với tất cả trọng lượng của bạn và không đặt các vật lên trên thiết bị.

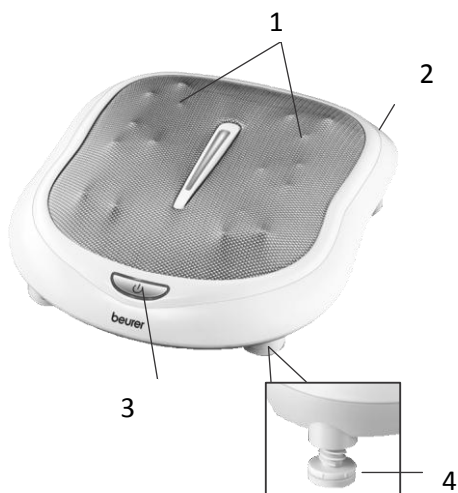

Mô tả thiết bị

1. Bề mặt massage với 9 đầu xoa bóp bấm huyết
2. Công tắc – tắt, mở
3. Nút nguồn và các chế độ
 - Nhấn lần 1: Massage xoa bóp bấm huyết
 - Nhấn lần 2: massage và thêm chức năng nhiệt (hồng ngoại)
 - Nhấn lần 3: Tắt
4. Chân điều chỉnh độ cao

4. Bắt đầu sử dụng

- Tháo dỡ thiết bị , kiểm tra nguồn cung cấp điện và dây dẫn
- Kê nối điện
- Ngồi thoải mái, đặt bàn chân của bạn trên các đầu mát-xa.
- Bật công tắc bên thân máy, sau đó bật nút nguồn phía trên để bắt đầu massage, bấm lần 2 để chuyển sang chế độ nhiệt hồng ngoại, bấm thêm 1 lần nữa để tắt thiết bị
- Dừng massage hoặc thay đổi vị trí của bạn hoặc điểm tiếp xúc chân nếu bạn thấy nó đau đớn hay khó chịu
- Dừng ép bất kỳ phần nào của cơ thể, đặc biệt là ngón tay vào giữa các đầu massage khi nó đang quay.
- Không sử dụng các thiết bị massage lâu hơn 15 phút. Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể gây kích thích các cơ bắp và gây ra căng thẳng thay vì thư giãn.
- Massage của một điểm cụ thể trên bàn chân có thể ảnh hưởng đến cơ quan tương ứng của cơ thể. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đạt được hiệu quả mong muốn.

5. Chăm sóc và bảo quản

Ngắt kết nối thiết bị trước khi lau chùi.

- Chỉ làm sạch các thiết bị theo cách thức quy định. Không để chất lỏng thâm nhập vào thiết bị
- Làm sạch các dụng cụ bằng vải hơi ẩm. Bạn cũng có thể làm ẩm miếng vải với xà bông ít bọt để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu hơn.
- Vết bẩn nhỏ hơn có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một miếng vải hoặc miếng bọt biển ẩm cùng với một ít chất tẩy rửa lỏng cho các loại vải nếu cần thiết. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa có chứa dung môi.
- Không sử dụng thiết bị một lần nữa cho đến khi nó khô hoàn toàn.

0902671010
Số: 016680265068
1) 5
SSPPN
N
)
SVV
0V131
)P