




### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ BEURER FT58


Kính gửi quý khách hàng ! Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Với nhiệt kế đo tai Beurer FT58 ( CHLB Đức ), bạn có thể đo được nhiệt độ cơ thể nhanh và chính xác trong vài giây. Công nghệ đo mới nhất có sử dụng cảm ứng tia hồng ngoại đã đem lại độ bền lâu dài của nhiệt kế. Nhiệt kế bạn có trong tay thỏa mãn tất cả các yêu cầu của hướng dẫn Châu Âu cho sản phẩm Y tế 93/42/EEC, và các tiêu chuẩn về chế tạo và lắp ráp.

#### 1. Tổng quan về thiết bị

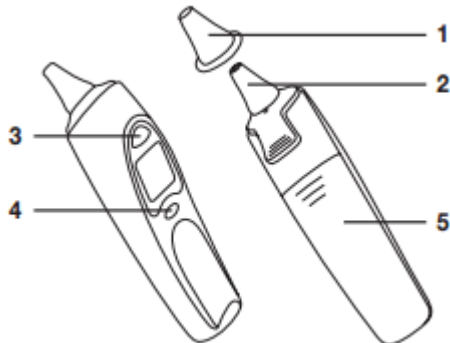


1. Nắp bảo vệ
2. Đầu cảm ứng
3. Nút START
4. Nút ON/OFF
5. Khoang chứa pin

#### Màn hình hiển thị:

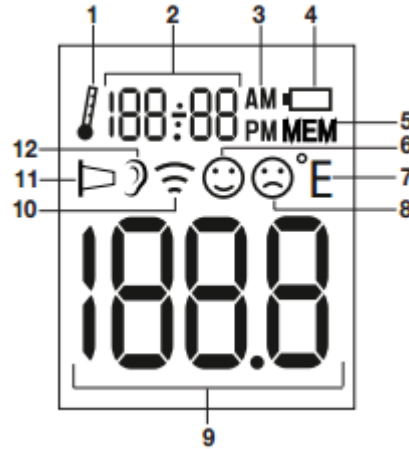

1. Chế độ nhiệt độ phòng
2. Hiển thị nhiệt độ phòng / lần / ngày
3. AM / PM hiển thị (thời gian)
4. Biểu tượng pin
5. Chế độ bộ nhớ
6. Biểu tượng không sốt
7. Đơn vị nhiệt độ (° C hoặc ° F)
8. Biểu tượng sốt
9. Hiển thị nhiệt độ
10. Chế độ nhiệt độ đối tượng
11. biểu tượng nắp bảo vệ
12. Chế độ nhiệt độ cơ thể

Để khởi động thiết bị, trước khi sử dụng lần đầu tiên, gỡ bỏ dải cách điện bằng nhựa nhô ra từ ngăn chứa pin

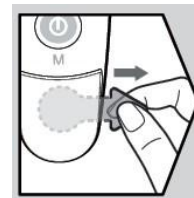

#### 2. Cài đặt ban đầu.


Lưu ý: Nhiệt kế tai cần được đặt trong phòng nơi các phép đo được thực hiện, trong ít nhất 30 phút trước khi sử dụng.

#### Cài đặt ngày/giờ và Chuyển đổi đơn vị nhiệt độ (°C → °F)


- Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt.
- Bấm và giữ nút START để chọn ngày/giờ/tháng/năm phù hợp.
- Nhấn nút ON/OFF để xác nhận.
- Nhấn nút START để chuyển đổi từ ° C → ° F, sau đó nhấn nút ON/OFF để xác nhận.
- Lặp lại các bước để chuyển đổi ngược lại.

## Cách sử dụng

- Lắp nắp bảo vệ sạch vào thiết bị cho đến khi nắp được bấm chắc vào đúng vị trí.

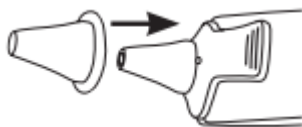


- Nhấn nút ON / OFF để khởi động thiết bị. (sẽ có 3 tín hiệu âm thanh)

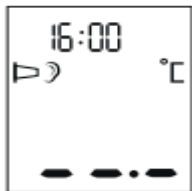

- Nếu ống tai hơi cong, nhẹ nhàng kéo tai hướng lên trên trước khi đưa đầu cảm biến và tai. Điều này rất quan trọng để phần đầu của nắp bảo vệ có thể được chỉ thẳng vào màng nhĩ.



- Ấn đầu thiết bị vào tai một cách cẩn thận, đồng thời nhấn nút START.

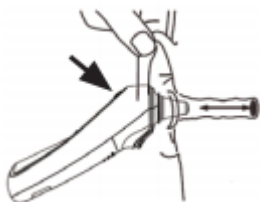

- Sau khoảng 1 giây, quá trình đo kết thúc bằng một tiếng bíp ngắn và giá trị đo được hiển thị trên màn hình LCD.



- Nếu nhiệt độ đo được dưới 38 °C (100,4 °F), màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng 😊 và 1 tín hiệu âm thanh ngắn sẽ được phát ra.
- Nếu nhiệt độ đo được ở khoảng 37,5-37,9° C, 1 tín hiệu âm thanh ngắn sẽ được phát ra.
- Nếu nhiệt độ đo được trên 38 °C (100,4 °F), biểu tượng ☹️ sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị LCD cùng 3 tín hiệu âm thanh ngắn.

## Đối với chế độ đo nhiệt độ đối tượng:

- Tháo nắp bảo vệ từ đầu cảm biến của nhiệt kế tai (nếu nó đang được bật).


- Nhấn nút ON / OFF để bật nhiệt kế tai. Ba tín hiệu âm thanh và màn hình hiển thị chuyển mạch trên.
- Đảm bảo rằng bạn đang ở trong chế độ nhiệt độ đối tượng (°).

## Để chuyển đổi giữa nhiệt độ cơ thể và chế độ nhiệt độ đối tượng, bấm nhanh và giữ ON / OFF nút và nút START cùng một lúc.

- Giữ đầu cảm biến của nhiệt kế tai 1-2 cm từ điểm đo mong muốn và nhấn nút START.
- Sau một giây, một tín hiệu âm thanh dài âm thanh và đo được hiển thị trong màn hình. Bấm nhanh ON / OFF nút để tắt nhiệt kế tai
- Đối với những lần đo tiếp theo, tháo nắp bảo vệ cũ và thay một cái mới.
- Để tắt thiết bị, hãy bấm và giữ nút ON/OFF / bộ nhớ (⊙) trong khoảng 3 giây. Thiết bị sẽ tự động tắt sau khoảng 1 phút khi không được sử dụng.

## Lưu ý:

Làm sạch thiết bị thật nhẹ nhàng sau mỗi lần sử dụng bằng tăm bông ẩm

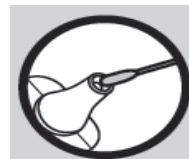

MEDICAL EQUIPMENT

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội  
CN Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM  
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)  
Hotline: 19006852

Web: www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn