

**ĐÈN HỒNG NGOẠI IL 11, IL 21, IL 30**



**1. CÔNG DỤNG CỦA TIA HỒNG NGOẠI**

Ánh sáng của một ngọn đèn thông thường không đem lại tác dụng làm lành vết thương hay các công dụng y học. Tuy nhiên, tia hồng ngoại, đã được y học thế giới liệt vào nhóm các "thiên nhiên liệu pháp", lại có thể đem lại các kết quả điều trị rất hữu ích.

Tia hồng ngoại sẽ tạo ra nhiệt năng để truyền vào cơ thể người. Dưới ảnh hưởng của tia hồng ngoại, nhiệt độ của máu sẽ tăng, giúp máu tuần hoàn dễ dàng hơn, tăng cường quá trình trao đổi chất và kích thích năng lượng tự bảo vệ của cơ thể. Ánh sáng hồng ngoại có thể giúp chóng lành các vết thương (tất nhiên đừng lạm dụng để làm bỏng da!) Đèn hồng ngoại được sử dụng rất hiệu quả trong việc chữa trị đau lưng, viêm bàng quang, đau răng, đau dây thần kinh, đau đầu kinh niên, viêm xoang và viêm tai giữa.

Đèn hồng ngoại còn có thể sử dụng song song với các biện pháp điều trị các bệnh về tai mũi họng, hữu ích trong việc chăm sóc sắc đẹp và da mặt, đặc biệt là trong việc làm sạch da.

**2. SỬ DỤNG ĐÈN HỒNG NGOẠI**

Tháo bỏ tất cả các vật liệu bao gói trước khi sử dụng đèn. Nên kiểm tra xem bóng đèn đã được vặn chặt và đúng cách chưa. Luôn đảm bảo đèn được đặt trên một mặt phẳng an toàn (không nghiêng để gây đổ hoặc có các vật liệu dễ cháy ở gần.)

Khi sử dụng, nên đặt đèn ở vị trí bạn cảm thấy dễ chịu (khoảng 50cm.) Nhắm mắt khi sử dụng đèn.

Chỉ nên sử dụng đèn mỗi lần tối đa 12 phút.

Đèn có 4 nấc chỉnh giúp bạn chọn được góc nghiêng phù hợp và thuận tiện nhất khi dùng.

**CHÚ Ý - VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN**

- Hãy đọc kỹ phần hướng dẫn này và giữ kèm theo máy để tiện tham chiếu.
- Gỡ bỏ tất cả các vật liệu bọc (như túi nilon, hộp các tông...) trước khi sử dụng.
- Chỉ được cắm vào nguồn điện với hiệu điện thế như đã ghi trên bảng hướng dẫn.
- Khi dùng đèn trên mặt, luôn nhắm mắt để tránh làm mắt bị thương (không bao giờ được nhìn trực diện vào ánh đèn hồng ngoại.)
- Không sử dụng đèn cho người mắc cảm nhiệt
- Không sử dụng đèn sau khi uống thuốc giảm đau, thuốc an thần hoặc uống rượu vì độ nhạy cảm với nhiệt của bạn có thể bị giảm. Nên tham vấn bác sĩ trước khi dùng.
- Dùng đèn kéo dài có thể gây bỏng da
- Không chạm vào bóng đèn hoặc tháo bóng khi đang cắm điện.


Luôn luôn rút đèn ra khỏi ổ cắm và để nguội trước khi chạm vào đèn.

- Trẻ em thường không biết những rủi ro khi sử dụng thiết bị điện. Do vậy, không nên cho trẻ sử dụng đèn khi không có người lớn trông coi.
- Không đóng gói hoặc cho đèn vào hộp khi đèn còn đang nóng.
- Các đồ vật dễ cháy cần đặt cách xa đèn ít nhất 80cm. Không treo đèn lên tường hoặc trần nhà.
- Không chạm vào đèn khi tay ướt (đặc biệt khi đèn đang cắm điện.) Không được làm ướt đèn. Chỉ sử dụng đèn khi đèn tuyệt đối khô.
- Giữ đèn cẩn thận, tránh va đập hoặc làm rơi.
- Rút đèn ra khỏi ổ điện bằng cách rút phích cắm, không cầm dây để giật khỏi ổ.
- Không được tự ý mở tháo đèn để chỉnh sửa.

**3. H-ỐNG DẪN THÊM CHO ĐÈN IL 30**

Đèn IL 30 có thêm một bộ đặt giờ giúp bạn thuận tiện hơn khi sử dụng. Bộ đặt giờ này cho phép điều chỉnh thời gian mong muốn sử dụng đèn. Dùng thanh trượt để đặt thời gian bạn muốn sử dụng (từ 2 cho tới 12 phút.) Nếu không muốn đặt giờ, hãy đưa thanh trượt về vị trí bật liên tục \*. Ở vị trí này, đèn sẽ không tự động ngắt mà sẽ bật liên tục (tuy nhiên, hãy cẩn thận khi dùng nấc \* này, dùng quá lâu có thể gây bỏng da.)

**Bộ đặt giờ của đèn IL 30.**

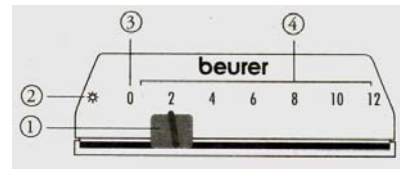

- ① Thanh trượt
- ② Vị trí bật liên tục
- ③ Vị trí tắt
- ④ Các vị trí đặt thời gian sử dụng (đơn vị: phút) – tối đa 12 phút

**4. VỆ SINH ĐÈN/THAY BÓNG ĐÈN**

Cần tắt đèn, rút điện và chờ đèn nguội trước khi làm vệ sinh đèn hoặc thay bóng.

Có thể lau đèn bằng giẻ ẩm. Không sử dụng các loại chổi cọ làm xước đèn hoặc các loại chất tẩy.

Tránh làm ướt đèn (đặc biệt không được để nước lọt vào bên trong đèn.) Chỉ sử dụng khi đèn tuyệt đối khô.

Lưu ý: nếu bóng hồng chỉ được thay bằng các bóng đèn hồng ngoại cùng loại.

**Loại bóng đèn thay thế:**

Loại đèn	Loại bóng có thể thay
IL 11	Infrared R95 E (100W)
IL 21, IL 30	Thera de Luxe R95 (150W)

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM -  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT**

Trụ sở: 141 Xã Đàn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Showroom : 141 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Tel: 043.577.3151 Fax: 043.577.3151 Hotline: 19006852

Email: [info@thietbiyte-eu.vn](mailto:info@thietbiyte-eu.vn)

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn>

<http://beurer-vietnam.com>