


## MÁY MÁT XA CẦM TAY MG100

Máy mát xa cầm tay MG100 là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình hàng đầu của Beurer. Với tính năng độc đáo, kiểu dáng hiện đại, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến nhất, MG100 đã thực sự làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất của thị trường Châu Âu và Quốc tế về chất lượng như CE, ISO...

Với các đầu mát xa công suất lớn, cùng tác dụng tích cực của đèn hồng ngoại, làm giảm căng thẳng và đau nhức, giúp bạn hoàn toàn thư giãn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa tác dụng của máy, cầm đọc kỹ và làm đúng theo những chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.

### 1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

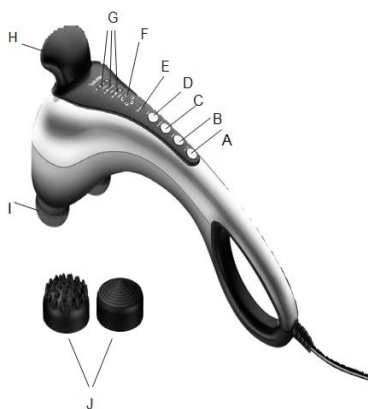

- A. Nút ON/OFF
- B. Nút Tốc độ: Điều chỉnh tốc độ massage
- C. Chương Trình: Lựa chọn các chương trình massage khác nhau
- D. Nút Nhiệt: Sưởi hồng ngoại
- E. Nút Khởi động: Bắt đầu chương trình
- F. Hiển thị tốc độ massage
- G. Chương trình massage
- H. Tay cầm phụ
- I. Đầu massage mặt với hệ thống sưởi hồng ngoại
- J. Đầu massage đỉnh kèm massage (có thể thay thế)

### 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt trước khi cắm điện. Bật thiết bị bằng cách nhấn nút ON/OFF. Chương trình bắt đầu khởi động.
- Nhấn nút "Speed" để tăng / giảm tốc độ massage.
- Nhấn nút "Programs" để lựa chọn giữa 3 chương trình massage khác nhau (với tốc độ cài đặt tự động)
- Chế độ sưởi hồng ngoại có thể được bật trong bất kỳ chương trình massage nào, bằng cách sử dụng nút "Heat".
- Sử dụng thiết bị bằng cả hai tay và đưa vào vùng cần mát xa trên cơ thể. Bạn có thể đứng, ngồi hay nằm, có thể massage cho bản thân hoặc người khác.
- Cường độ massage có thể được thay đổi bằng cách thay đổi lực ấn của tay lên thiết bị.
- Không nên xoa bóp một vùng cơ thể nhất định quá 3 phút.
- Sau khi sử dụng tối đa là 15 phút, rút phích cắm của thiết bị và để nguội. Giữ thiết bị ở nơi khô ráo.

Lưu ý:

- Không sử dụng các thiết bị massage trước khi đi ngủ.
- Thiết bị này có một cơ chế ngắt tự động sau thời gian hoạt động tối đa là 15 phút.

### 3. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Vì lý an toàn, thiết bị phải chỉ được vận hành như sau:

- Chỉ với điện áp quy định trên thiết bị
- Không sử dụng thiết bị nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hại nào trên thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi có bão.
- Chỉ sử dụng ở nơi khô thoáng, với 2 bàn tay khô.

- Không được cố lấy lại thiết bị khi nó đã rơi xuống nước. Cần rút thiết bị khỏi ổ cắm ngay lập tức trong trường hợp này.
- Không vận hành thiết bị massage quá 15 phút (nguy cơ quá nóng) và để cho nó nguội bớt trong 15 phút, trước khi sử dụng tiếp.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không sử dụng thiết bị dưới chăn, gối.

Lưu ý:

- Không sử dụng thiết bị massage trên trẻ em và động vật.
- Không sử dụng thiết bị massage trên người bị thoát vị đĩa đệm hoặc có những thay đổi bất thường của các đốt sống.
- Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các thiết bị massage trên người đang sử dụng máy tạo nhịp tim.
- Không sử dụng các thiết bị massage trên da hoặc bộ phận cơ thể bị sưng, bị bỏng, bị viêm ...
- Không sử dụng các thiết bị massage thai kỳ.
- Không sử dụng các thiết bị massage trên mặt (mắt), trên thanh quản hoặc trên các bộ phận đặc biệt nhạy cảm khác của cơ thể.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị trong khi bạn đang ngủ.
- Không bao giờ sử dụng các thiết bị sau khi uống thuốc hoặc uống rượu (giảm mức độ nhận thức).

#### 4. Vệ sinh và bảo quản

- Ngắt kết nối thiết bị trước khi làm sạch thiết bị.
- Chỉ làm sạch các thiết bị theo các cách thức quy định. Không được để chất lỏng thâm nhập vào thiết bị hoặc các phụ kiện.
- Không tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến khi nó khô hoàn toàn.

- Giữ thiết bị massage ở một nơi khô mát, tránh xa tầm với của trẻ em.

#### 5. Sự cố kỹ thuật và biện pháp xử lý

Vấn đề	Nguyên nhân	Biện pháp xử lý
Đầu massage không chuyển động	Thiết bị không kết nối với nguồn điện.	Kết nối thiết bị với nguồn điện chính và bật máy.
	Thiết bị không chuyển động.	Bật máy
	Tự động ngắt do thiết bị quá nóng	Ngắt kết nối với nguồn điện, chờ ít nhất 15 phút, cắm lại và bật nút ON/OFF.

#### 6. Thông số kỹ thuật

Kích thước	160 x 150 x 450 mm
Trọng lượng	1740 g
Công suất định mức	20 W
Điện áp định mức	220-240 V ~ 50 Hz



**ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH**  
**CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT**  
Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội  
CN Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM  
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)  
Hotline: 19006852  
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn