

# GHẾ MASSAGE MG200



Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm ghế Massage MG200 của hãng Beurer. Các thiết bị đi kèm sản phẩm gồm:

- Ghế massage
- Bộ cung cấp điện
- Hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành

## 1. Giới thiệu về sản phẩm

Với sự hỗ trợ của thiết bị Ghế massage điện MG200 này, bạn đã mang lại cho mình dịch vụ massage hiệu quả và dễ chịu. Việc massage có thể giúp vừa thư giãn và kích thích, và được sử dụng phổ biến để điều trị các cơ bắp cứng hoặc căng thẳng, đau đớn và mệt mỏi. Thiết bị này cung cấp các chế độ massage mạnh mẽ và chuyên sâu cho toàn bộ lưng. Do đó, ghế massage cần được đặt đúng vị trí phù hợp trên đệm ghế của bạn để hoạt động một cách hiệu quả nhất.

Thiết bị này chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng cá nhân, không được dùng cho mục đích y tế hoặc thương mại.

## 2. Hướng dẫn sử dụng an toàn.

Thiết bị này chỉ dành cho xoa bóp lưng của người sử dụng. Nó không thể thay thế điều trị y tế. Không sử dụng các thiết bị massage nếu có những lời cảnh báo sau đây áp dụng cho bạn.

### Cảnh báo

Sử dụng các thiết bị massage này bị cấm trong các trường hợp sau đây:

- Không sử dụng với trường hợp người điều trị có những thay đổi do bệnh tật hoặc bị thương trong khu vực massage (ví dụ như vấn đề đĩa đệm, vết thương hở)
  - Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ trong thời kỳ mang thai và trên động vật
    - Không sử dụng trong khi bạn ngủ
    - Không sử dụng trong xe
    - Không sử dụng thiết bị trong khi sử dụng các chất làm giảm thời gian phản ứng (ví dụ như thuốc giảm đau, rượu)
  - Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 phút (do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị tự làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng tiếp.
  - Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn các thiết bị massage là thích hợp cho bạn.
  - Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả năng tinh thần. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.
- Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các thiết bị massage nếu:
- Bạn bị một căn bệnh nghiêm

trọng hoặc đang hồi phục từ một cuộc phẫu thuật.

- Bạn đang được trang bị máy tạo nhịp tim, hoặc các thiết bị cấy ghép khác
- Bạn đang bị bệnh tiểu đường
- Bạn đang có những cơn đau chưa rõ nguyên nhân.

Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong các hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết quả của việc sử dụng thiết bị cho những mục đích không phù hợp hoặc bất cần.


Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện khác, thiết bị massage này phải được xử lý thận trọng và sự quan tâm để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.

Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau:

- Chỉ sử dụng với điện áp định mức.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị khi có giông bão. Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện.
- Không bao giờ kéo cáp điện hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối cung cấp điện từ nguồn điện ổ cắm.
- Sửa chữa các thiết bị chỉ nên được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn. Sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm người sử dụng. Trong trường hợp sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.
- Nếu các đơn vị cung cấp điện hoặc dây điện bị hỏng, phải được thay thế kịp thời bởi một đại lý ủy quyền.


### 3. Mô tả sản phẩm

#### Ghế massage

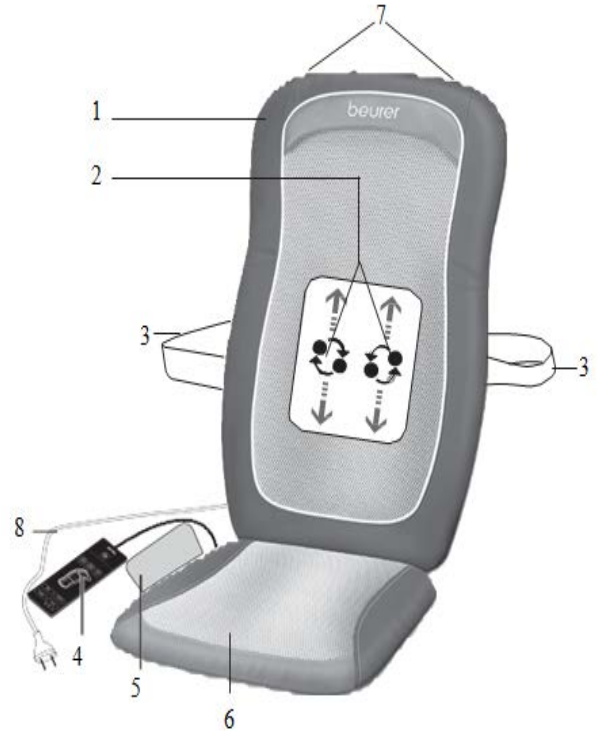

1. Lớp bảo vệ
2. Bốn đầu massage
3. Đai cố định ghế
4. Điều khiển cầm tay
5. Túi bảo quản
6. Đệm ghế (Có thể tháo rời)
7. Móc khóa kéo (phía sau, dùng để tháo lớp bảo vệ)
8. Dây cáp nguồn

#### Điều khiển cầm tay

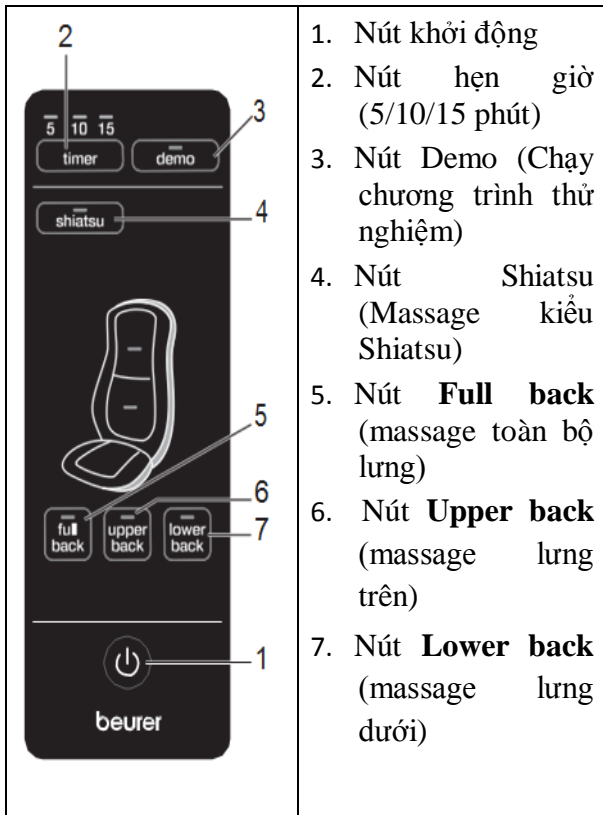

1. Nút khởi động
2. Nút hẹn giờ (5/10/15 phút)
3. Nút Demo (Chạy chương trình thử nghiệm)
4. Nút Shiatsu (Massage kiểu Shiatsu)
5. Nút **Full back** (massage toàn bộ lưng)
6. Nút **Upper back** (massage lưng trên)
7. Nút **Lower back** (massage lưng dưới)

#### 4. Hướng dẫn sử dụng.

- Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở một vị trí thoải mái trước khi dần dần chuyển trọng lượng của bạn lên thiết bị massage.
- Dừng massage hoặc thay đổi vị trí massage hoặc áp lực lên thiết bị nếu bạn cảm thấy đau đớn hay khó chịu.
- Không sử dụng thiết bị massage lâu hơn 15 phút. Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể quá kích thích các cơ bắp và gây ra căng thẳng thay vì thư giãn.
- Hãy ngồi thoải mái và thẳng lưng, đảm bảo rằng bạn ngồi ở vị trí chính giữa ghế. Như vậy, các đầu massage mới có thể di chuyển và massage toàn bộ cột sống của bạn.
- Bật thiết bị massage bằng cách nhấn

nút khởi động. Chọn khu vực bạn muốn massage với các nút **full back/ upper back/ lower back**. Lúc này, các đèn LED sẽ hiển thị các khu vực massage đã được thiết lập.

- Các đầu massage Shiatsu từ từ di chuyển từ vị trí thấp nhất của lưng và di chuyển lên và xuống tại khu vực cần massage. Sự chuyển động quay và chuyển động lên xuống được kết hợp nhịp nhàng, tạo cảm giác thư giãn cho người sử dụng
- Thiết bị này có chức năng tắt máy tự động, được thiết lập với thời gian hoạt động tối đa 15 phút. Bạn cũng có thể lựa chọn chế độ tự động tắt cho thiết bị (5/10/15 phút). Việc thay đổi lập trình của bộ hẹn giờ sẽ bắt đầu lại quá trình tính thời gian nghỉ.
- Để tránh cho thiết bị quá nóng khi sử dụng, không thiết lập lại chế độ hẹn giờ khi đang sử dụng thiết bị.
- Thiết bị cũng sẽ tự ngắt khi thiết bị quá nóng. Trong trường hợp này, hãy để thiết bị nguội bớt trong khoảng 30 phút trước khi tiếp tục sử dụng
- Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 phút (do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị tự làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng tiếp.
- Có thể ngừng quá trình massage bằng cách nhấn nút khởi động 1 lần nữa. Lưu ý: khi tắt thiết bị, các đầu massage sẽ chuyển động về vị trí ban đầu ở vùng thắt lưng. Chỉ khi các đầu massage đạt tới vị trí này, thiết bị mới được tắt hoàn toàn.
- Nếu thiết bị được ngừng sử dụng ở chế độ Shiatsu, nó sẽ trở về vị trí bắt đầu và chuyển mạch tự tắt.
- Không ngắt kết nối thiết bị với nguồn

điện trong quá trình hoạt động.

### 5. Bảo quản và lưu trữ

- Luôn ngắt kết nối với thiết bị trước khi làm sạch thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phương pháp được quy định để làm sạch thiết bị. Không được để bất cứ chất lỏng nào xâm nhập vào thiết bị hoặc các phụ kiện.
- Vết bẩn nhỏ có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một miếng vải hoặc miếng bọt biển ẩm, và một số chất tẩy rửa nhẹ khi cần thiết. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch nào mang tính ăn mòn cao.
- Lớp bảo vệ ghế có thể được giặt máy ở nhiệt độ 40°C
- Ngưng sử dụng thiết bị này cho đến khi nó khô hoàn toàn.
- Nếu bạn sử dụng các ốc vít hoặc khóa an toàn cho việc vận chuyển thiết bị, cần chắc chắn rằng chúng được lấy ra trước khi sử dụng thiết bị.

### 6. Sự cố kỹ thuật và biện pháp khắc phục.

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
--------	-------------	----------------



#### ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH

#### CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội  
 CN Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM  
 CN Miền Trung : Số 285 Tiêu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
 Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)  
 Hotline: 19006852  
 Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn

Đầu massage quay với tốc độ chậm	Tải trọng trên đầu massage là quá lớn.	Nhả đầu massage.
Đầu massage chỉ chuyên động tại 1 vùng nhất định	Bạn đã chọn chế độ massage tại 1 vùng nhất định	Nhấn các nút <b>full back/upper back/lower back</b> để chuyển hoặc mở rộng vùng được massage.
Đầu massage không chuyên động	Thiết bị không kết nối với nguồn điện.	Kết nối thiết bị với nguồn điện và bật lại máy.
	Thiết bị chưa được bật lên	Nhấn nút khởi động để bật thiết bị và chọn chế độ massage.
	Chưa tháo khóa an toàn. Cơ chế massage bị hỏng.	Liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.
	Thiết bị tự ngắt do quá nóng, thiết bị có dấu hiệu hỏng.	Liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.