

beurer

ĐAI MASSAGE VAI, CỔ, LƯNG, CHÂN BEURER MG151




1. Giới thiệu thiết bị

Các đầu mát xa xoay của đai mát xa Shiatsu mô phỏng theo chuyển động áp lực nhào nắn của mát xa Shiatsu. Đai mát xa Shiatsu này đem lại cho bạn và những người dùng khác trải nghiệm mát xa nhẹ nhàng và hiệu quả mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Bạn có thể dùng đai để mát xa thư giãn hoặc kích thích, rất hiệu quả cho việc đẩy lùi căng cơ, đau nhức và mệt mỏi. Đai cũng giúp mát xa mạnh với cường độ lớn cho các vùng như cổ, vai và đùi.

Trọn bộ sản phẩm

- Đai mát xa 3D Shiatsu MG 151
- Bộ nguồn
- Hướng dẫn sử dụng

Mô tả thiết bị

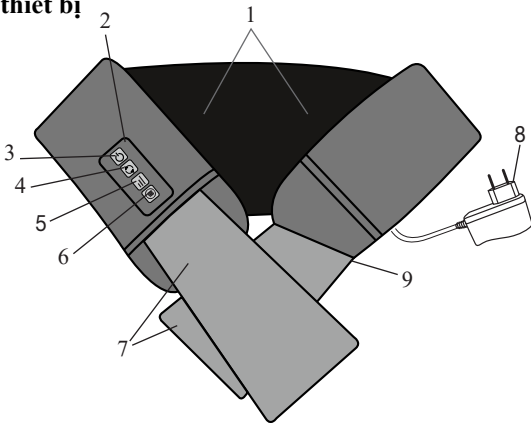

- 1. 8 đầu massage 3D (4 đầu massage nhiệt và sáng) xoay theo cặp
- 2. Bảng điều khiển
- 3. Nút Nguồn
- 4. Nút Đảo chiều xoay
- 5. Nút cường độ
- 6. Nút Chức năng nhiệt
- 7. Tay cầm
- 8. Bộ nguồn
- 9. Cáp kết nối nội bộ nguồn

2. Lưu ý và cảnh báo

- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Thiết bị có bề mặt nóng khi vận hành. Những người nhạy cảm với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
- Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng thiết bị thật cẩn thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật.
- Chỉ được sử dụng thiết bị với mục đích được miêu tả trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hỏng hóc gây ra bởi sử dụng không đúng cách hay bất cẩn.
- Nếu có lỗi trong khi đang vận hành, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện
- Ngăn thiết bị và dây điện tiếp xúc với nước

- Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô, với tay khô
- Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
- Không sử dụng thiết bị quá 15 phút để tránh thiết bị quá nóng.
- Để thiết bị nguội lại trong 15 phút trước khi tiếp tục sử dụng.
- Không sử dụng thiết bị dưới chân hay gối.
- Tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi vệ sinh.
- Đảm bảo các bộ phận xoay luôn xoay không kẹt
- Đảm bảo không để tóc mắc kẹt trong thiết bị.
- Đảm bảo không đặt thiết bị quá gần các nguồn nhiệt như lò nướng, máy sưởi hoặc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
- Không sử dụng thiết bị trên các bộ phận cơ thể có biến đổi bất thường hay bị thương tổn (ví dụ như thoát vị đĩa đệm, có vết thương hở, sưng, bóng, viêm, trên vết mổ, mao mạch, tĩnh mạch, mụn, da mẩn đỏ, mụn rộp và các loại bệnh về da khác)
- Không sử dụng thiết bị trên các phần cứng của cơ thể (ví dụ như đầu gối và các khớp) và mắt (vùng mắt), thanh quản hoặc các bộ phận đặc biệt nhạy cảm khác.
- Không sử dụng thiết bị sau khi dùng thuốc hay uống các đồ uống có cồn (giảm khả năng nhận thức!) và trên vùng da được thoa kem dưỡng hay các loại thuốc trước đó (ví dụ như cao nóng)
- Không sử dụng thiết bị trong các trường hợp ốm nặng hoặc vừa trải qua phẫu thuật ở nửa trên cơ thể, đang mắc chứng huyết khối, tiểu đường hoặc bị đau mà không xác định được nguyên do.

3. Sử dụng thiết bị

Bật thiết bị bằng nút Nguồn. Các đầu mát xa sẽ bắt đầu xoay. Bạn có thể chọn hướng xoay đầu mát xa bằng cách nhấn nút Đảo chiều xoay

Nếu bạn muốn bật Chức năng nhiệt, nhấn nút Chức năng nhiệt. Nhấn nút này một lần nữa để tắt chức năng nhiệt.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 mức cường độ bằng cách sử dụng nút Cường độ. Thiết bị tự động khởi động ở mức cường độ thấp nhất.

Nhấn nút Nguồn một lần nữa để tắt thiết bị

ⓘ Lưu ý


- Bạn phải luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi sử dụng thiết bị. Nếu cảm thấy đau hay khó chịu, hãy dừng sử dụng hoặc thay đổi áp lực tiếp xúc lên cơ thể qua tay cầm.
- Không sử dụng thiết bị quá 15 phút. Sử dụng trong thời gian lâu hơn có thể dẫn đến cơ bị kích thích quá độ, gây ra căng cơ thay vì mục đích thư giãn
- Thiết bị được có tính năng tự động tắt sau khoảng thời gian sử dụng tối đa 15 phút.

Các cách sử dụng thiết bị




Mát xa cổ

- Đặt thiết bị lên vùng cổ
- Điều chỉnh áp lực tiếp xúc tới mức bạn muốn bằng cách sử dụng tay cầm.

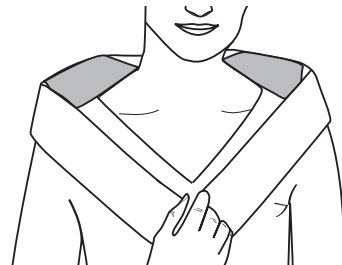

Mát xa lưng (vùng lưng trên):

- Đặt thiết bị quanh vùng lưng trên
- Điều chỉnh áp lực tiếp xúc tới mức bạn muốn bằng cách sử dụng tay cầm.

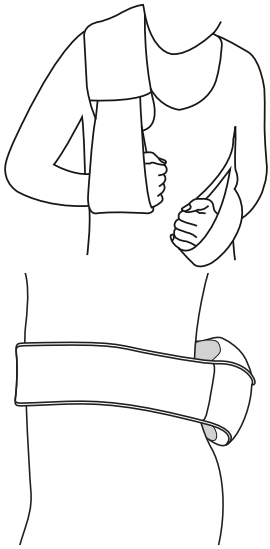

Mát xa lưng (vùng xương bả vai):

- Đặt thiết bị theo đường chéo quanh vai trái và phải như hình.
- Điều chỉnh áp lực tiếp xúc tới mức bạn muốn bằng cách sử dụng tay cầm.

Mát xa lưng (vùng lưng dưới):

- Đặt thiết bị quanh hông như hình
- Điều chỉnh áp lực tiếp xúc tới mức bạn muốn bằng cách sử dụng tay cầm.

4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị

Vệ sinh

- Luôn rút phích cắm khỏi ổ điện và tháo bộ dây điện khỏi thiết bị trước mỗi lần vệ sinh
- Có thể loại bỏ các vết bẩn nhỏ bằng vải hoặc bọt biển ẩm, sử dụng thêm một ít chất tẩy rửa nhẹ dạng lỏng dùng trong giặt là. Không sử dụng các dung môi làm sạch
- Không sử dụng thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn

Cất giữ

Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, nên cất giữ thiết bị trong hộp đựng ban đầu và đặt tại nơi khô ráo. Hãy đảm bảo không đặt bất cứ vật gì lên thiết bị.

5. Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Đầu mát xa xoay quá chậm	Áp lực tác động lên đầu mát xa quá lớn	Ấn đầu mát xa nhẹ hơn

6. Thông số kỹ thuật

Kích thước (D/C/R) : 104 x 18 x 13 cm
 Trọng lượng : 1.68kg
 Điện áp đầu vào : 100-240 V~; 50/60 Hz; 1.0 A
 Điện áp đầu ra : 12 V === 2000 mA; 24 W



**ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT**

Trụ sở & Showroom : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
 CN Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM
 CN Miền Trung : 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
 Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
 Hotline : 19006852
 Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn