

TẮM SƯỞI HK 45




1. Giới thiệu thiết bị

Trọn bộ sản phẩm

- 1 Tắm sưởi
- 1 Vỏ bọc
- 1 Bộ điều khiển
- 1 Hướng dẫn sử dụng

Mô tả thiết bị

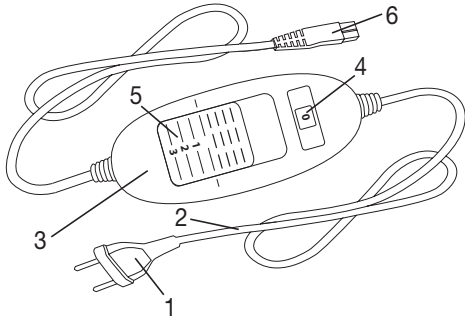

1. Phích cắm
2. Bộ dây điện
3. Bộ điều khiển
4. Màn hình cài đặt nhiệt độ phát sáng
5. Công tắc trượt
6. BẬT/TẮT và các mức nhiệt độ Giắc cắm

2. Lưu ý và cảnh báo

- Đảm bảo thực hiện theo các hướng dẫn sau đây để phòng tránh nguy cơ gây thương tích cho người sử dụng hoặc các thiết bị về vật chất (điện giật, bỏng da, cháy). Các thông tin không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của người dùng và những người khác mà còn bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng. Vì vậy, hãy chú ý đến các ghi chú an toàn và hướng dẫn sử dụng thiết bị cho người khác trước khi giao thiết bị cho họ.
- Không sử dụng thiết bị cho những người ít nhạy cảm với nhiệt hoặc những người dễ bị tổn thương bởi không có khả năng phản ứng với mức nhiệt nóng (ví dụ những người bị bệnh tiểu đường, những người có da bị biến chứng do các loại bệnh, những người có da bị se ở vùng sử dụng thiết bị hoặc những người vừa sử dụng thuốc giảm đau, đồ uống có cồn).
- Không sử dụng thiết bị cho trẻ từ 0-3 tuổi vì chúng chưa có khả năng phản ứng lại với mức nhiệt cao.
- Trẻ từ 3 đến 8 tuổi không sử dụng thiết bị khi phụ huynh hoặc người lớn có trách nhiệm trông coi chưa cài đặt bộ điều khiển về mức nhiệt thấp nhất và trẻ chưa hiểu rõ cách sử dụng an toàn.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không cho trẻ nghịch thiết bị.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng cho bệnh viện.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
- Không được để ghim hoặc các vật có bề mặt sắc nhọn tiếp xúc với thiết bị.
- Không sử dụng khi thiết bị bị gấp, bó lại hay bị ướt.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ điều khiển chính hãng đi kèm.
- Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên nhãn thiết bị.

- Điện và từ trường phát ra từ thiết bị này có thể ảnh hưởng tới chức năng của máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, chúng đều nằm dưới mức giới hạn cho phép: Cường độ điện trường tối đa 5.000 V/m, cường độ từ trường tối đa 80 A/m, mật độ từ thông tối đa 0.1 mT. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất máy tạo nhịp tim trước khi sử dụng thiết bị.
- Không kéo, xoắn hay uốn gấp dây điện.
- Hãy kiểm tra thiết bị thường xuyên để phát hiện các trường hợp mòn, rách hay hư hại. Nếu xuất hiện các dấu hiệu trên hay nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc thiết bị không còn nóng lên nữa, hãy liên hệ với bộ phận bảo hành hoặc nhà cung cấp để kiểm tra trước khi sử dụng trở lại.
- Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dừng sử dụng thiết bị.
- Tuyệt đối không mở hay tự sửa chữa thiết bị (bao gồm cả các phụ kiện). Nếu không, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo tính năng vận hành không lỗi của thiết bị và bảo hành sẽ mất hiệu lực.
- Khi tắm sưởi được bật:
 - Không đặt các vật khác lên thiết bị (ví dụ va li hoặc giỏ giặt).
 - Không đặt các nguồn nhiệt như chai nước nóng, tắm sưởi khác hay các vật tương tự lên thiết bị.
- Các linh kiện điện tử của bộ điều khiển sẽ nóng lên khi thiết bị hoạt động. Vì thế, không được đặt bộ điều khiển ở phía trên hoặc phía dưới thiết bị khi đang sử dụng.
- Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng thiết bị, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

3. Sử dụng thiết bị

3.1 Hệ thống an toàn

⚠ THẬN TRỌNG

Thiết bị được trang bị một HỆ THỐNG AN TOÀN. Công nghệ cảm biến với công tắc ngắt tự động khi có lỗi giúp người dùng an toàn khi nhiệt độ tăng cao trên toàn bộ bề mặt thiết bị. Nếu HỆ THỐNG AN TOÀN tắt thiết bị, màn hình cài đặt nhiệt độ sẽ không sáng ngay cả khi thiết bị đã được bật lại. Hãy chú ý vì lý do an toàn, thiết bị có thể sẽ không hoạt động nữa khi xảy ra lỗi. Hãy mang thiết bị tới các địa điểm bảo hành để kiểm tra.

Không kết nối thiết bị bị lỗi với điều khiển khác cùng loại. Điều này sẽ kích hoạt công tắc tắt vĩnh viễn thông qua hệ thống an toàn của điều khiển.


3.2 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

⚠ THẬN TRỌNG

Hãy chắc chắn thiết bị không bị gấp hay bó lại trong khi sử dụng.

- Đầu tiên, cắm giắc cắm để kết nối bộ điều khiển với thiết bị.

- Sau đó cắm phích điện vào ổ điện.

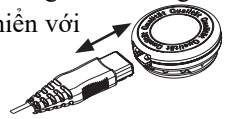

3.3 Bật thiết bị

Để bật thiết bị, gạt công tắc trượt BẬT/TẮT và cài đặt nhiệt độ tới các mức 1, 2 hoặc 3. Màn hình cài đặt nhiệt độ sẽ sáng khi thiết bị được bật.

3.4 Cài đặt nhiệt độ

Mức 0: TẮT

Mức 1: nhiệt độ nhỏ nhất

Mức 2: nhiệt độ trung bình

Mức 3: nhiệt độ cao nhất

ⓘ LƯU Ý:

Cách nhanh nhất để làm ấm thiết bị là khi bắt đầu sử dụng, chỉnh nhiệt độ ở mức cao nhất.

ⓘ LƯU Ý:

Các loại tắm sưởi này có chức năng làm ấm nhanh, cho phép thiết bị nóng lên chỉ trong 10 phút đầu.

⚠ CẢNH BÁO

Nếu dự định sử dụng thiết bị trong vài giờ, hãy chọn cài đặt nhiệt độ với mức nhiệt thấp nhất để tránh bị nóng cơ thể dẫn đến bỏng.



3.5 Tự động ngắt

Thiết bị được trang bị chức năng tự động ngắt. Chức năng này tắt nguồn cấp nhiệt sau khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên trong khoảng 90 phút. Sau đó màn hình



cài đặt nhiệt độ bắt đầu nháy sáng. Thiết bị có thể được bật lại, tuy nhiên trước đó, công tắc trượt BẬT/TẮT và cài đặt nhiệt độ (5) phải được gạt về mức "0" (TẮT). Sau khoảng 5 giây, có thể bật lại các công tắc này.

3.6 Tắt thiết bị

Để tắt thiết bị, gạt công tắc trượt BẬT/TẮT và cài đặt nhiệt độ về mức "0" (TẮT). Màn hình cài đặt nhiệt độ sẽ không còn sáng nữa.

I LƯU Ý:

Nếu không sử dụng thiết bị, gạt công tắc trượt BẬT/TẮT về mức "0" (TẮT) và rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Sau đó tháo bộ điều khiển khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm.

4. Vệ sinh và bảo trì

⚠ CẢNH BÁO

Trước khi vệ sinh, luôn luôn rút phích cắm khỏi ổ điện trước. Sau đó tháo bộ điều khiển khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm để tránh gây điện giật.

⚠ THẬN TRỌNG

Không được để bộ điều khiển tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác để tránh hỏng hóc.

Để vệ sinh bộ điều khiển, hãy sử dụng vải không xơ khô. Không sử dụng hóa chất hay các chất làm sạch gây mòn. Có thể loại bỏ các vết bẩn nhỏ trên vỏ bọc bằng cách dùng vải ẩm có thấm một ít nước xà phòng giặt là nhẹ nếu cần.

- Hãy chú ý không giặt thiết bị bằng các chất hóa học hay vụn, sấy khô, đặt qua máy cán ép hay bàn là.
- Có thể giặt thiết bị bằng máy giặt.
- Chỉnh máy giặt về chương trình giặt nhẹ đặc biệt với nhiệt độ nước 30°C (chương trình giặt đồ len). Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ với lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Hãy lưu ý việc giặt thường xuyên sẽ không tốt cho thiết bị. Do đó, chỉ nên giặt trong máy giặt tối đa 10 lần trong vòng đời sử dụng của tấm sưởi.
- Ngay sau khi giặt xong, chỉnh thiết bị về hình dáng ban đầu khi thiết bị vẫn còn ẩm và trải tấm sưởi nằm phẳng trên giá phơi để tấm sưởi được khô.
- Không sử dụng kẹp hoặc các vật tương tự để giữ tấm sưởi trên giá phơi để tránh làm hỏng tấm sưởi.
- Không kết nối lại bộ điều khiển với thiết bị cho đến khi bộ dây điện và thiết bị hoàn toàn khô để tránh làm hỏng tấm sưởi.
- Không bật tấm sưởi để làm khô thiết bị, tránh nguy cơ giật điện!

5. Bảo quản thiết bị

Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo bộ điều khiển khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm và cất giữ thiết bị trong hộp đựng ban đầu.

⚠ THẬN TRỌNG

Đề thiết bị nguội lại trước khi cất đi để không làm hỏng thiết bị. Để tránh thiết bị bị gấp, không đặt bất cứ vật gì lên mặt thiết bị khi đang cất giữ.

6. Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Màn hình cài đặt nhiệt độ không sáng khi: - bộ điều khiển được kết nối với thiết bị đúng cách - phích cắm kết nối với ổ điện có điện - công tắc trượt đã được gạt ở mức 1, 2 hoặc 3	HỆ THỐNG AN TOÀN đã tắt thiết bị vĩnh viễn	Gửi thiết bị và bộ điều khiển tới trung tâm bảo hành

7. Thông số kỹ thuật

Xem trên nhãn ghi của thiết bị.



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

CN Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM

CN Miền Trung : 285 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)

Hotline : 19006852

Web : beurer.vn / thietbiyte-eu.vn